



FAKTABLAD

LESO-TÅNGEN (2 längder)

MATERIAL

Aluminium som är röd-eloxerad

Rostfri styrpinne och mekaniskt stopp

Cellgummi på gripytorna med hög friktion


Gummislang över mekaniska stoppet

Magnet med ytbeläggning av zink

<u>LÄNGD</u>	<u>VIKT</u>	<u>GRIPÖPPNING</u>	<u>RESERVDEL</u>
60 cm	75 g	80 mm	Cellgummi- bitar levereras i par.
78 cm	100 g	76 mm	

ANVÄNDNINGSPERFORMANSINFORMATION

Tänk på att hålla tången så att greppändan blir parallell med underlaget när små föremål, som t.ex. mynt, skall tas upp. Det ger bästa gripförmåga. Se fig. Regel: Om man har tången i höger hand så skall alltid den guldfärgade etiketten vara på samma sida som tummen.

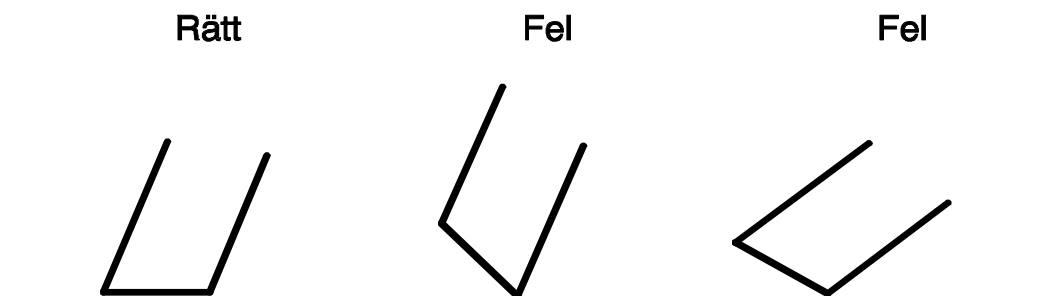

Då magnetiska föremål som t.ex. nålar skall plockas upp, vänd då på tången så att magneten som sitter på den böjda delen kommer mot golvet.

OBS! Undvik att ha tången helt i vatten eftersom det då tränger in vid styrpinnen och det är svårt att få ut allt vattnet efteråt.

Postadress:
LESO
Huldrans väg 9
371 53 Karlskrona

Tel/Fax:
0455-311 322

E-post:
info@leso.se

Hemsida:
www.leso.se